

Andador Posterior




By **WEX**

ANCHO

Mín.: 60 CM

Máx.: 68 CM

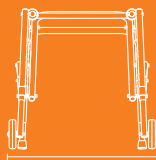

1. Información general

XS 0.70 a 0.90 mts.

M 1.10 a 1.30 mts.

S 0.90 a 1.10 mts.


L 1.30 a 1.65 mts.

PESO MÁX.
USUARIO
75 KG.

PESO DE
EQUIPO
4 KG. (XS)


2. Accesorios opcionales [Más información en www.rehab.com.ar](http://www.rehab.com.ar)

Los accesorios son opcionales y se eligen según las necesidades del usuario.

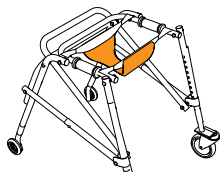


Chiripá de 4 puntos

Sostiene al usuario para que no colapse.

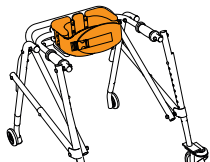


Soporte de pelvis

Estabiliza la pelvis en la línea media.

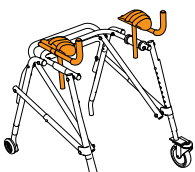

Apoyo antebraquial

Proporciona una zona de descarga para el antebrazo. Incluye toma giratoria.

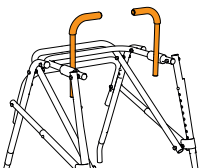


Toma anterior


Se adaptan a distintas necesidades del usuario.

Secuencia de uso

- 1 Abra el andador. Apoye el mismo contra el piso en forma lateral. Tome las patas anteriores y posteriores y haga fuerza hacia afuera.

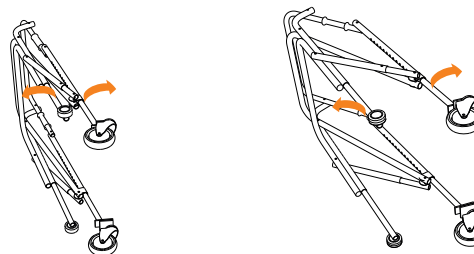


- 2 Regule el andador acorde a las medidas del usuario, presionando el botón que se encuentra en las patas delanteras y traseras, y posicione al usuario.

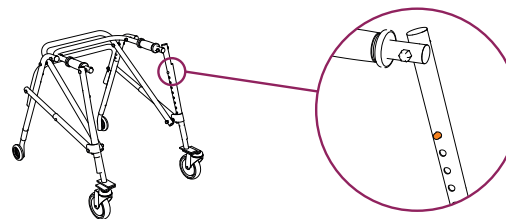

- 3 Para cerrar el andador, presione los botones laterales. Tome las patas y haga fuerza hacia adentro.


- 4 Si el equipo posee soporte de pelvis, desabroche la faja antes de posicionar al usuario. Luego abroche la hebilla y ajústela.
- 5 Si posee chiripá, desabroche las 2 hebillas delanteras, posicione al usuario, y vuelva a abrocharlas.

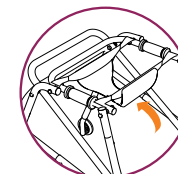


Antes de usar el Andador Posterior

- Asegúrese de que los frenos se encuentren bloqueados al entrar y salir del equipo. Compruebe que funcionen correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas móviles, perillas y tornillos de ajuste estén estables y bloqueados.
- Asegúrese de la estabilidad del producto y del correcto funcionamiento de las ruedas antes de colocar al usuario en el mismo.
- Ajuste el equipo de acuerdo con las medidas y necesidades del paciente.
- La regulación del equipo en altura total no debe exceder las medidas máximas y mínimas especificadas en el manual. El peso máximo del paciente no debe superar los 75kg.
- No dejar al paciente en el equipo sin supervisión.
- Está prohibido dejar el equipo y al paciente en terreno inestable sin vigilancia. Evite las superficies inclinadas/resbaladizas. Está prohibido subir/bajar escaleras.
- Está prohibido el uso del equipo en el caso de constatarse que el mismo se encuentra dañado o carece de alguna de sus partes.
- La realización de modificaciones al equipo que no sean llevadas a cabo por personal de Rehab anulan la garantía del producto. Rehab no se responsabiliza por las mismas.

Ante cualquier duda comunicarse con el personal de Rehab.

 +54 11 5263 0226

 info@rehab.com.ar

 +54 9 11 5732 6711

 Santo Tomé 4265 | CABA

By **WEX**



¡Contactanos!

 +54 11 5263 0226

 +54 9 11 5732 6711

 info@rehab.com.ar

 Santo Tomé 4265 | CABA

¡Seguinos!

 @Rehab.arg

 /Rehab.Argentina



By **WEX**