

Reposera Inoxidable

By **WEX**



TALLES

XS 0.80 a 1.00 mts.

S 1.00 a 1.25 mts.

M 1.25 a 1.45 mts.


PESO

**PESO MÁX.
USUARIO**
35 KG.

**PESO DE
EQUIPO (XS)**
2,6 KG.


Partes del equipo

1. **Asiento y respaldo**
2. **Cinturón de tronco y cadera**
3. **Faja de sujeción para piernas**
4. **Control cefálico y de cadera (opcional)**

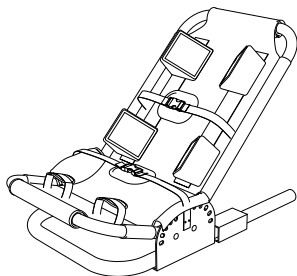

Secuencia de uso


- 1 Regule la inclinación de respaldo y asiento.
- 2 Desabroche las fajas de cadera y piernas.
- 3 Posicione al usuario. Ajuste la faja de cadera. A continuación las fajas de tronco y piernas.

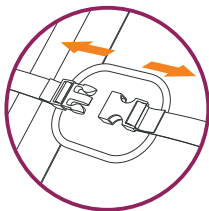


2. Accesorios opcionales

Más información en www.rehab.com.ar


Los accesorios son opcionales y se eligen según las necesidades del usuario.

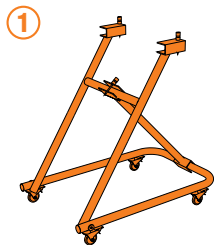

Base rodante

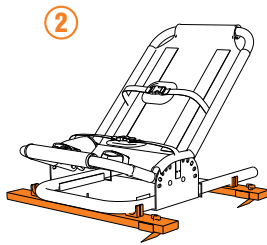


Soporte de borde

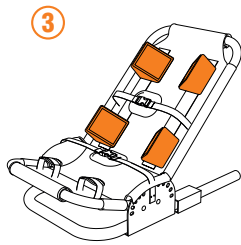


Control cefálico y de tronco

Armado de accesorios


- 1 Si posee un soporte de borde, asegure que este fijo a la bañadera. Luego coloque la reposera a presión en las trabas.

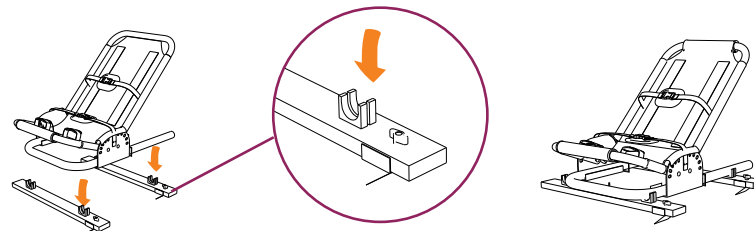

- 2 Si posee una base rodante, fije la columna a la H, con una traba pasante de aluminio.

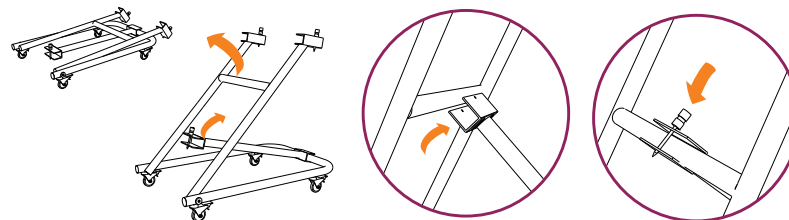


- 3 Coloque la reposera, y trábela con los pernos pasantes.

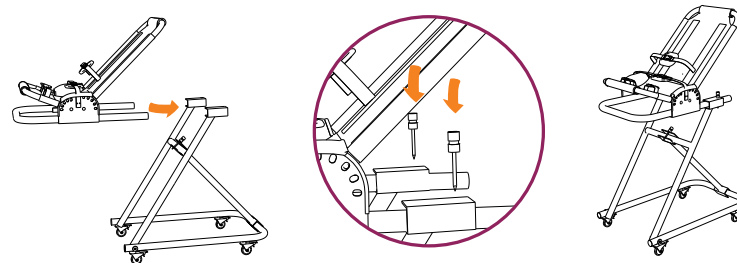

Posicionamiento


- 1 La cabeza del usuario debe quedar ubicada entre los controles cefálicos.
- 2 Las piernas deben quedar flexionadas en el borde del asiento.

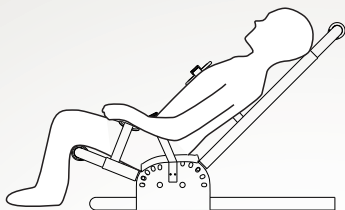


Recomendaciones

Las regulaciones se realizan con los botones pulsadores de bronce, de accionamiento manual. No se utilizan llaves o destornilladores. Para ajustar la base rodante plegable, es necesaria una llave de 1/2" o 13 mm.


Antes de posicionar al usuario asegúrese que:

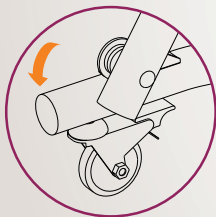

Si posee base rodante las ruedas con freno estén bloqueadas.

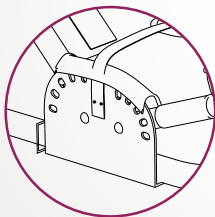

Los botones de bronce no se encuentren pulsados. Debe estar fijo el respaldo y el asiento.

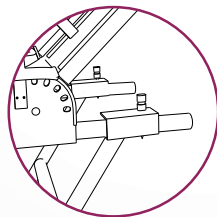

Las trabas pasantes de aluminio fijen la reposera correctamente a la base.

By **WEX**

☎ +54 11 5263 0226

✉ info@rehab.com.ar

☎ +54 9 11 5732 6711

📍 Santo Tomé 4265 | CABA

Antes de usar la Reposera Inoxidable

- Compruebe regularmente que los cinturones estén correctamente abrochados. Compruebe las cinchas, correas y accesorios.
- Asegúrese de que los topes antideslizantes sean funcionales. Compruebe que los botones y trabas encajen correctamente y que los tornillos de ajuste estén estables y bloqueados.
- En caso de utilizar la base rodante, asegúrese de que las trabas pasantes de aluminio fijen la reposera correctamente y que los frenos se encuentren bloqueados al entrar y salir del equipo. Compruebe que funcionen correctamente.
- Asegúrese de la estabilidad del producto y del correcto funcionamiento de las ruedas (base rodante) antes de colocar al usuario en el mismo.
- Ajuste el equipo de acuerdo con las medidas y necesidades del paciente. El peso máximo del paciente no debe superar los 35kg.
- No dejar al paciente en el equipo sin supervisión. Evite las superficies inclinadas/resbaladizas.
- Está prohibido el uso del equipo en el caso de constatarse que el mismo se encuentra dañado o carece de alguna de sus partes.
- La realización de modificaciones al equipo que no sean llevadas a cabo por personal de Rehab anulan la garantía del producto. Rehab no se responsabiliza por las mismas.

Ante cualquier duda comunicarse con el personal de Rehab.

 +54 11 5263 0226

 info@rehab.com.ar

 +54 9 11 5732 6711

 Santo Tomé 4265 | CABA

By **WEX**