

Bipedestador Bee



By **WEX**

Leer antes de usar el equipo >>



Información general

TALLES

XS 0.65 a 0.90 mts.


S 0.80 a 1.10 mts.

M 1.00 a 1.40 mts.

PESO

PESO MÁX.
USUARIO
50 KG.

PESO DE
EQUIPO (XS)
15 KG.

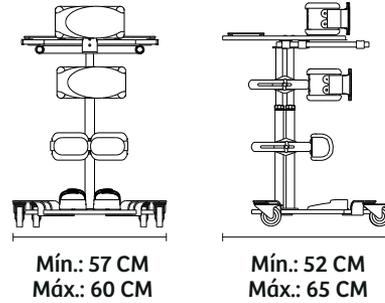

Partes del equipo


A. Soporte de tronco

B. Mesa desmontable

C. Soporte de pelvis

D. Soporte de rodilla

E. Taloneras giratorias

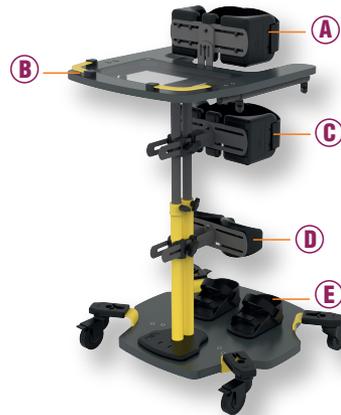

Accesorios opcionales



Apoyacabeza Bee




Soporte pechera




Soporte de tronco

Secuencia de uso

- 1 Regule el equipo acorde a las medidas del usuario. Únicamente para regular el ancho de los controles anatómicos (pads) se utiliza la llave acompañada con el equipo.

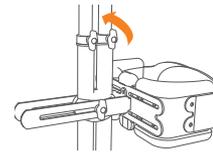

Para regular la altura total del equipo desajuste las perillas de la columna.

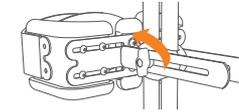


Para regular la altura y profundidad de los controles desajuste las perillas.




Para regular el ancho de los pads, desajuste los tornillos con la llave adjunta al manual.

- 2 Desajuste las fajas de tronco, cadera y cintas de taloneras para proceder al posicionamiento.

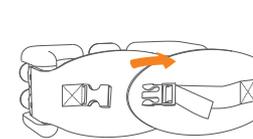

Desabroche las hebillas, y despegue los velcros.

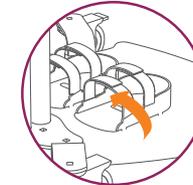

Desajuste las perillas en la parte inferior de la base para regular las taloneras.

- 3 Posicione al usuario:
 - El control de tronco debe quedar 3cm por debajo de la axila.
 - El control de pelvis debe quedar centrado a la altura de la cadera.
 - El control de rodillas debe quedar a la altura de la rótula.
 - En caso de que el equipo cuente con apoyacabeza, el centro del mismo debe quedar a la altura de los ojos del usuario.

Ajuste las fajas de control de cadera, luego de tronco. Finalmente ajuste las cintas de talonera.

Antes de usar el Bipedestador Bee

- Asegúrese de que los frenos se encuentren bloqueados al entrar y salir del equipo. Compruebe que funcionen correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas móviles, perillas y tornillos de ajuste estén estables y bloqueados.
- Asegúrese de la estabilidad del producto y del correcto funcionamiento de las ruedas antes de colocar al usuario en el mismo.
- Ajuste el equipo de acuerdo con las medidas y necesidades del paciente.
- La regulación del equipo en ancho de controles, y altura total no debe exceder las medidas máximas y mínimas especificadas en el manual. El peso máximo del paciente no debe superar los 50kg.
- No dejar al paciente en el equipo sin supervisión.
- Está prohibido dejar el equipo y al paciente en terreno inestable sin vigilancia. Evite las superficies inclinadas/resbaladizas. Está prohibido subir/bajar escaleras.
- Está prohibido el uso del equipo en el caso de constatarse que el mismo se encuentra dañado o carece de alguna de sus partes.
- La realización de modificaciones al equipo que no sean llevadas a cabo por personal de Rehab anulan la garantía del producto. Rehab no se responsabiliza por las mismas.

Ante cualquier duda comunicarse con el personal de Rehab.

 +54 11 5263 0226

 info@rehab.com.ar

 +54 9 11 5732 6711

 Santo Tomé 4265 | CABA

By **WEX**



¡Contactanos!

 +54 11 5263 0226

 +54 9 11 5732 6711

 info@rehab.com.ar

 Santo Tomé 4265 | CABA

¡Seguinos!

 @Rehab.arg

 /Rehab.Argentina

By **WEX**

