


# Reposera de Baño Inox

## Manual Instructivo

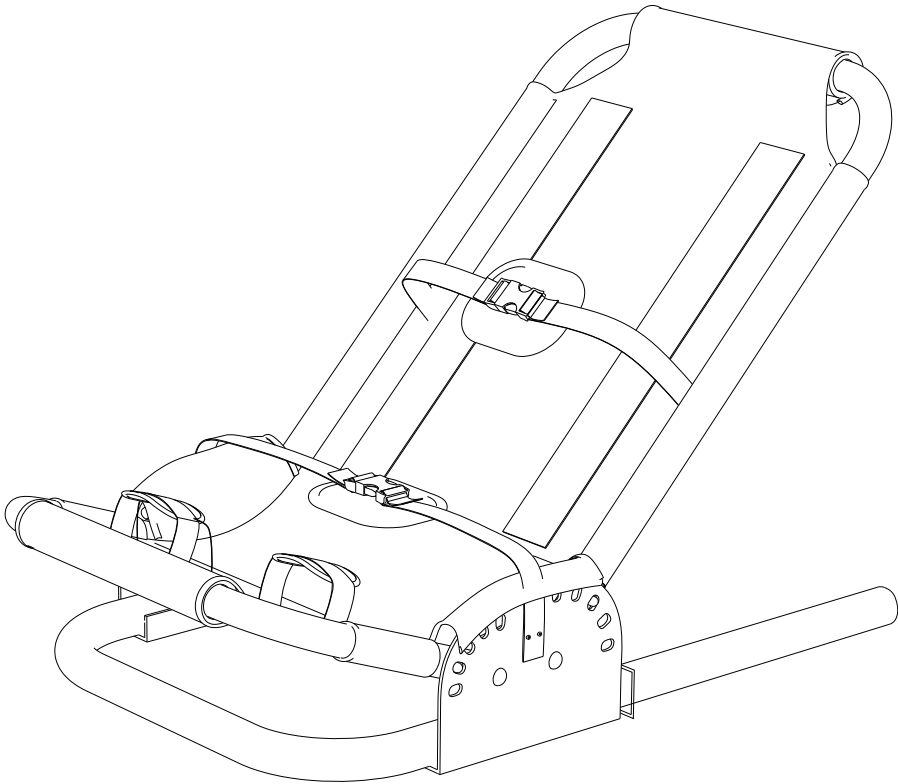

El diseño simple y práctico de la Reposera de Baño Inox brinda una ayuda ideal para la higiene corporal. Fabricada en aluminio y acero inoxidable, es plegable y liviana lo que permite un fácil transporte y guardado. Como accesorios, cuenta con controles cefálicos y bases rodantes en distintos tamaños, que se adaptan a las distintas necesidades de higiene del usuario.

	Tamaño S	Tamaño M	Tamaño L
Altura usuario aprox.	0,80 a 1,00 m	1,00 a 1,25 m	1,25 a 1,45 m
Profundidad de asiento	25 cm	30 cm	40 cm
Altura de respaldo	60 cm	70 cm	80 cm



**ATENCIÓN!**

Recomendamos leer atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el producto, como también que un profesional de rehabilitación ajuste el equipo acorde a las necesidades del usuario.

# Reposera de Baño Inox

## CALIDAD Y GARANTÍA

Cada equipo de **Rehab** cuenta con un N° de Serie único e irrepetible, que nos permite brindar un seguimiento post-venta, por lo cual recomendamos no quitar la etiqueta adherida al mismo.

La Reposera de Baño Inox y sus accesorios poseen una garantía válida por 12 meses a partir de la fecha de entrega. Dentro de este período los ajustes del equipo podrán ser realizados por **Rehab** sin costo adicional.



### Atención

La garantía será válida siempre y cuando los ajustes o reparaciones sean realizadas por REHAB. Cualquier modificación no autorizada podría anular la garantía del equipo.

## MANTENIMIENTO Y REGULACIONES

Se recomienda limpiar periódicamente el chasis y los controles con un paño húmedo. Compruebe periódicamente si existen señales de desgaste o desgarres en la costura, tela, hebillas y almohadillas. En caso de existir desgaste contáctenos para una reparación o sustitución.

Las regulaciones se realizan con los botones pulsadores de bronce, de accionamiento manual. No se utilizan llaves o destornilladores. Para ajustar la base rodante plegable, es necesaria una llave de 1/2" o 13 mm.



### Atención

No use materiales de limpieza que contengan cloro o metilaldeídos. Las regulaciones deben ser realizadas por personal capacitado. La regulación y/o ajuste incorrecto puede resultar en severos daños en la salud y seguridad del usuario




## RECOMENDACIONES PREVIAS

La Reposera de Baño Inox se entrega completamente armada. Antes de posicionar al usuario asegúrese que:

A) Si posee base rodante las ruedas con freno y giro libre están bloqueadas


B) Los botones de bronce no se encuentren pulsados. Debe estar fijo el respaldo y el asiento.

C) Las trabas pasantes de aluminio fijen la reposera correctamente a la base o soporte de borde.

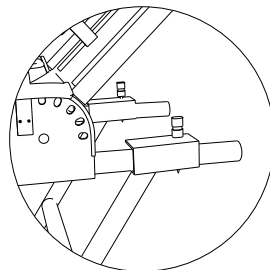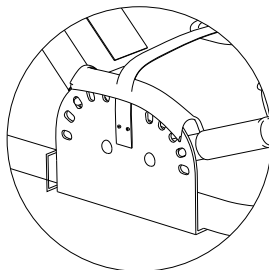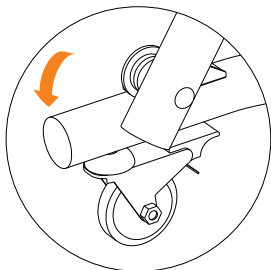


## SECUENCIA DE USO Y POSICIONAMIENTO CORRECTO

- 1 **Regule el equipo acorde a las medidas del usuario.**
- 2 **Desabroche las fajas de cadera y piernas y luego posicione al usuario.**
- 3 **Primero ajuste la faja de cadera y luego las fajas de piernas**

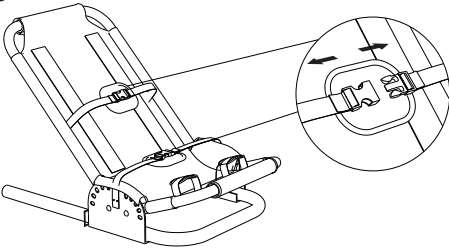


## ARMADO DE ACCESORIOS

- 4 **Si posee un soporte de borde, asegure que este fijo a la bañera. Luego coloque la reposera a presión en las trabas**

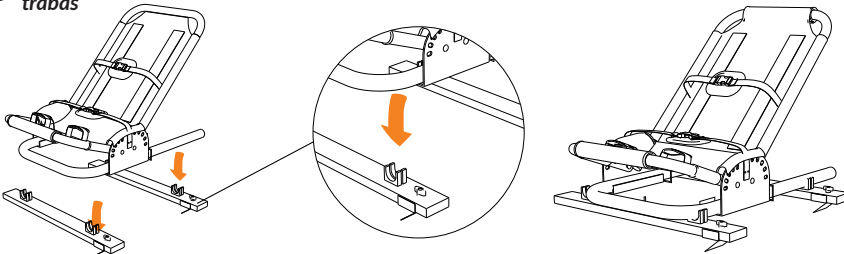

- 5 **Si posee una base plegable, fije la reposera con las trabas pasantes de aluminio.**

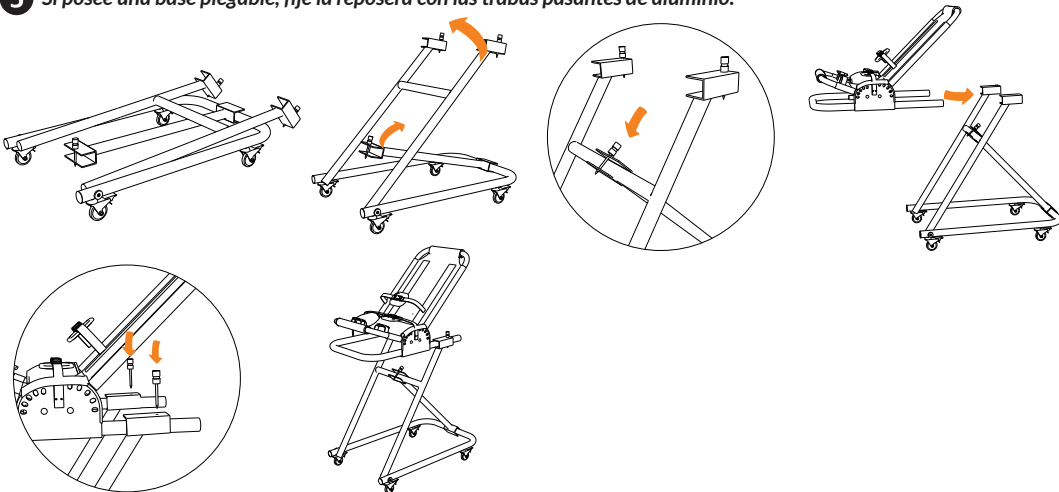

### Atención


**RECOMENDAMOS LA SUPERVISION CONTINUA DE UN ACOMPAÑANTE O PERSONAL CAPACITADO**

Verificar periódicamente el funcionamiento correcto de las fajas. Puntualmente el velcro de sujeción, las hebillas plásticas de seguridad y las costuras de las cintas. Ellas proveen la sujeción, soporte y estabilidad del usuario. Tanto la faja de pelvis como la faja de tronco deben ser usados simultáneamente. La seguridad del usuario puede correr peligro si se utilizan por separado.

## POSICIONAMIENTO CORRECTO

La cabeza del usuario debe quedar ubicada entre los controles cefálicos, y las piernas deben quedar flexionadas en el borde de la butaca.


En caso de que las rodillas del usuario no lleguen al borde del asiento, o si la cabeza del usuario sobresale por fuera del respaldo de la reposera, el tamaño de reposera pedido no es el correcto.

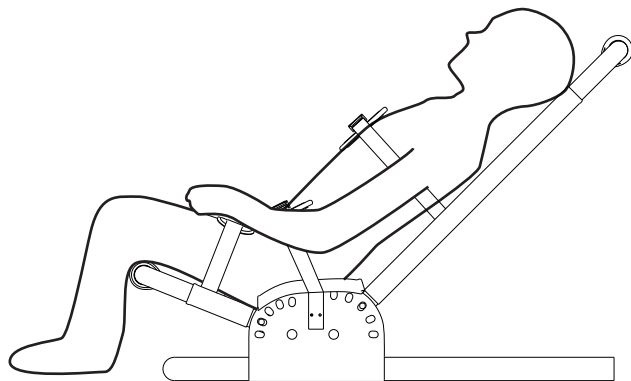

### Atención


Estos parámetros son los recomendados técnicamente, evalúe junto al profesional a cargo los ajustes finos para cada usuario.

## PARTES DEL EQUIPO

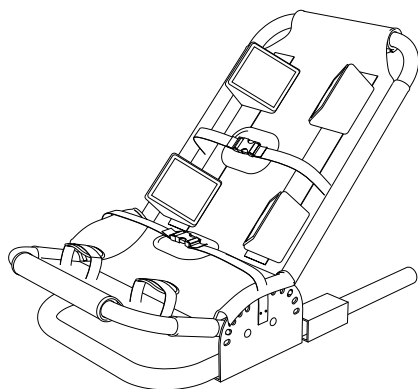


Asiento y Respaldo realizado en tela impermeable apta para productos de higiene personal.  
Cinturón de tronco y cadera y faja de sujeción para piernas.


## ACCESORIOS OPCIONALES

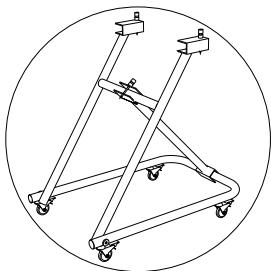

Base rodante plegable, plastificada para evitar oxidación

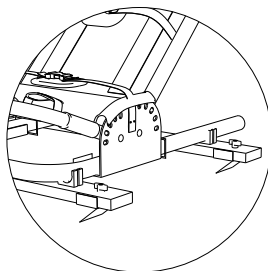

Soporte para colocar la Reposera en una tina o banadera.

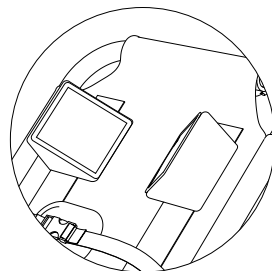

Controles cefálicos y de tronco

El logo y el nombre REHAB son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

 Pola 2477, CABA - Argentina

 [www.rehab.com.ar](http://www.rehab.com.ar)

 +54 11 4635 7177 (Líneas Rotativas)

 /Rehab.Argentina