

CE FDA

# PrimePOPSplint™

PrimePOPSplint: Diseñado para mayor comodidad y contención.



1- Sumergir la venda en agua



2- Comprimir ligeramente y retirar el exceso de agua.



3- Estirar la venda para eliminar los pliegues y laminar el exceso de yeso




4- Envolver la r cula suavemente con las vendas el sticas hasta que se endurezca

## Orden de pedido


N�. Ref.	Descripci�n	Tama�o	Rollos/ Caja Interna
PPSR 310	PrimePOPSplint™ Roll 3in	3in x 288in x 10Layers	1Roll/Box
PPSR 410	PrimePOPSplint™ Roll 4in	4in x 288in x 10Layers	1Roll/Box
PPSR 515	PrimePOPSplint™ Roll 5in	5in x 288in x 15Layers	1Roll/Box
PPS 415	PrimePOPSplint™ Pre Cut 4in	4in x 15in x 10Layers	20Pcs / Box
PPS 430	PrimePOPSplint™ Pre Cut 4in	4in x 30in x 10Layers	10Pcs / Box
PPS 530	PrimePOPSplint™ Pre Cut 5in	5in x 30in x 15Layers	10Pcs / Box
PPS 545	PrimePOPSplint™ Pre Cut 5in	5in x 45in x 15Layers	7Pcs / Box

**Férula Común**

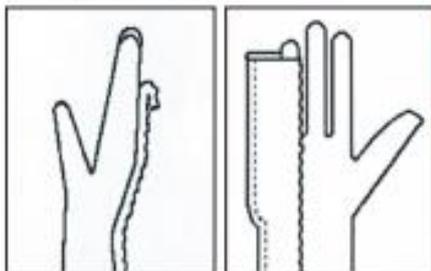


**Indicación**  
Esguince de muñeca  
**Tamaño**  
2", 3" o 5 Adulto  
2", 3" o 4 Niño

**Férula boxeador**

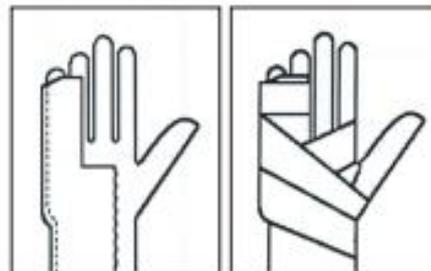


**Indicación**  
4to Fractura metacarpiana  
5to Fractura metacarpiana  
Lesión  
**Tamaño**  
3" Niño  
4" Adolescente  
6" Adulto

**Férula en gota**

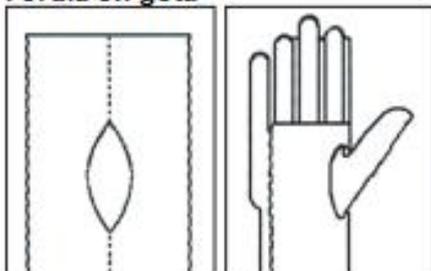


**Indicación**  
Fractura de carpo  
Fractura metacarpiana  
Herida en el dedo u otra fractura  
**Tamaño**  
3" Niño  
4" Adolescente  
6" Adulto

**Férula carpiana**

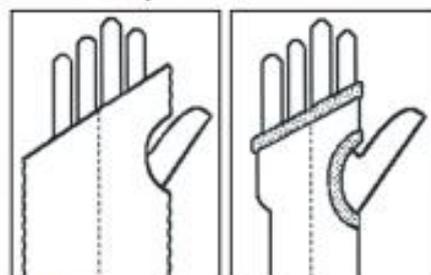


**Indicación**  
Fractura de carpo  
Lesión de túnel carpiano  
**Tamaño**  
3" Niño  
4" Adolescente  
6" Adulto

**Pinza inversa**

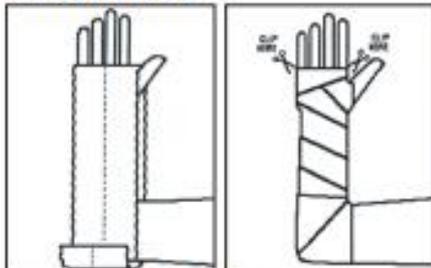


**Indicación**  
Sospecha de fractura  
Esguince / distensión de muñeca  
**Tamaño**  
3" Niño  
4" Adolescente  
6" Adulto

**Tobillo**

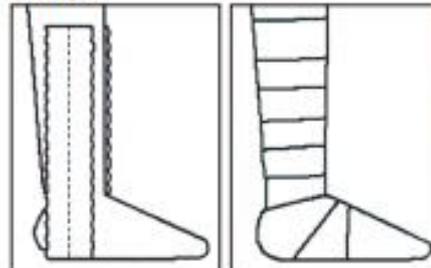

**Indicación**  
Fractura de tobillo  
Esguince de tobillo  
Otras  
**Tamaño**  
6" Adulto  
4-5 Niño

**Corte a través de rodilla**

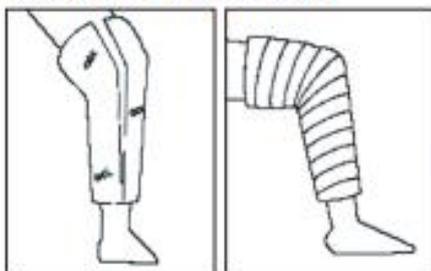


**Indicación**  
Esguince de rodilla  
Distensión  
Desgarros de ligamentos  
Otras  
**Tamaño**  
6" Adulto  
4-5 Niño

**Corte a través del tobillo**




**Indicación**  
Tensión de tobillo  
Fractura  
**Tamaño**  
6" Adulto  
4-5 Niño

**Tobillo posterior reforzado**

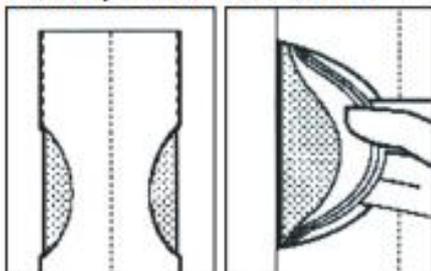

**Indicación**  
Esguince de tobillo  
Tensión  
Fractura  
**Tamaño**  
6" Adulto  
4-5 Niño

**Vendaje posterior - Tobillo**

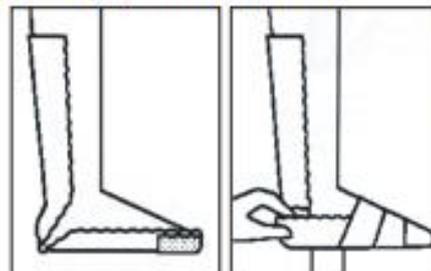

**Indicación**  
Tensión de tobillo  
Fractura  
Esguince  
**Tamaño**  
6" Adulto  
4-5 Niño



**Prime Medical Inc. Korea**  
189 Gumdang-ri, Mado-myon, Hwasung-si,  
Gyeonggi-do, Korea  
Tel. +82-31-355-8374 / Fax. +82-31-355-8320  
sales@primemedical-inc.com  
www.primemedical-inc.com

**Prime Medica Promotion Pvt. Ltd. India**  
107, Neelkanth Estate No. 1 Sativali,  
Vasai (E), Dist: Thane-401 208 Maharashtra, India  
Tel. +91-250-3291725 / 6526135  
Fax. +91-250-2480551  
india@primemedical-inc.com