
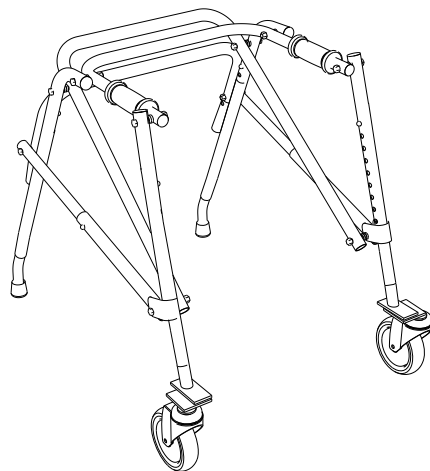


# Andador Posterior

## Manual Instructivo

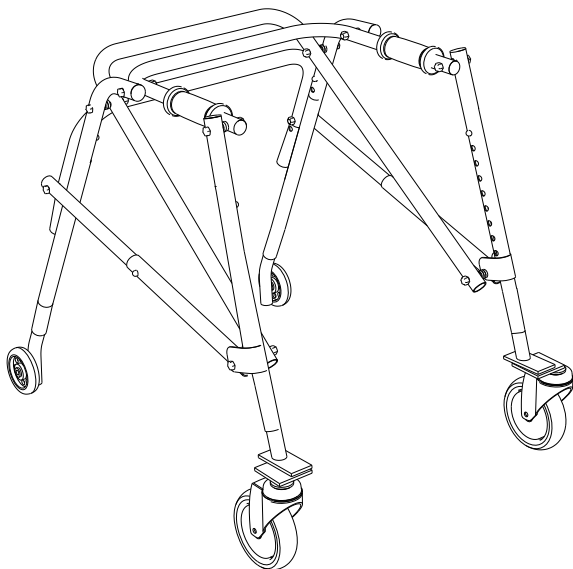

Diseñado para usuarios que necesitan mínimos requisitos para lograr la marcha. Plegable, regulable en altura y fabricado íntegramente en aluminio, el Andador Posterior garantiza ser un equipo ultra liviano y fácil de transportar. Sus distintos accesorios opcionales hacen posible el uso de este andador en un mayor rango de usuarios.

	Tamaño XS	Tamaño S	Tamaño M	Tamaño L
Altura usuario aprox.	0,70 a 0,90 m	0,90 a 1,10 m	1,10 a 1,30 m	1,30 a 1,55 m
Altura mín. (Dist. mangos al piso)	34 cm	48 cm	63 cm	70 cm
Altura max. (Dist. mangos al piso)	48 cm	64 cm	81 cm	100 cm
Ancho (Regulado al mínimo)	60 cm	60 cm	67 cm	68 cm
Prof. (Regulado al mínimo)	52 cm	60 cm	79 cm	83 cm
Ancho - alto - profundidad	60-45-32 cm	60-77-23 cm	67-92-19 cm	68-113-18 cm



**ATENCIÓN!**

Recomendamos leer atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el producto, como también que un profesional de rehabilitación ajuste el equipo acorde a las necesidades del usuario.

# Andador Posterior

## CALIDAD Y GARANTÍA

Cada equipo de **Rehab** cuenta con un N° de Serie único e irrepetible, que nos permite brindar un seguimiento post-venta, por lo cual recomendamos no quitar la etiqueta adherida al mismo.

El Andador Posterior y sus accesorios poseen una garantía válida por 12 meses a partir de la fecha de entrega. Dentro de este período los ajustes del equipo podrán ser realizados por **Rehab** sin costo adicional.



### Atención

La garantía será válida siempre y cuando los ajustes o reparaciones sean realizadas por REHAB. Cualquier modificación no autorizada podría anular la garantía del equipo.

## MANTENIMIENTO Y REGULACIONES

Se recomienda limpiar periódicamente el chasis y los controles con un paño húmedo. No use detergente. En caso de tener como accesorio Chiripá o Soporte de Pelvis, compruebe periódicamente si existen señales de desgaste o desgarres en la costura, tela, hebillas y almohadillas. Si existiera desgaste contáctenos para una reparación o sustitución.



### Atención

No use materiales de limpieza que contengan cloro o metilaldeídos. Las regulaciones deben ser realizadas por personal capacitado. La regulación y/o ajuste incorrecto puede resultar en severos daños en la salud y seguridad del usuario.




## RECOMENDACIONES PREVIAS

El Andador Posterior se entrega completamente armado. Antes de posicionar al usuario asegúrese que:

A) Las ruedas delanteras deben tener activado el control de dirección.



B) Las ruedas traseras deben tener bloqueado el control antiretroceso.

C) El equipo esté completamente extendido. Revise que todos los botones pulsadores de bronce se encuentren en la posición correcta.

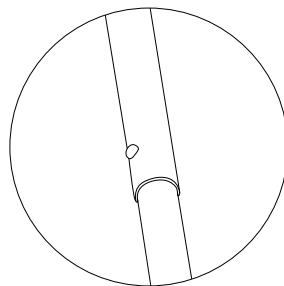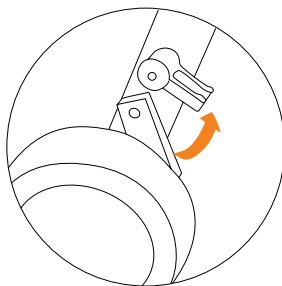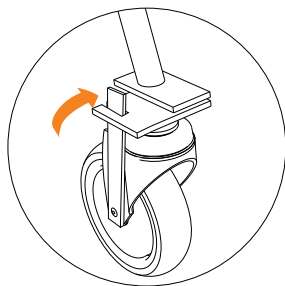


## SECUENCIA DE USO Y POSICIONAMIENTO CORRECTO

- 1** Abra el andador. Apoye el mismo contra el piso en forma lateral. Tome las patas anteriores y posteriores y haga fuerza hacia afuera.

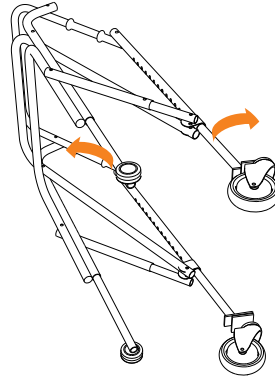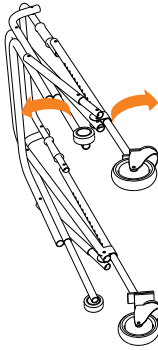



- 2** Regule el andador acorde a las medidas del usuario, presionando el botón que se encuentra en las patas delanteras y traseras, y posicione al usuario.

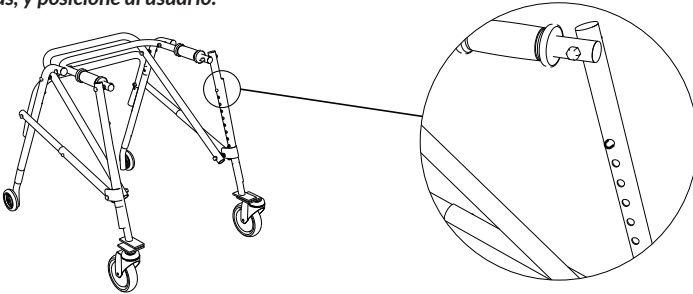

Accione los pulsadores de bronce para regular la altura de las patas


- 3** Para cerrar el andador, presione los botones laterales. Tome las patas y haga fuerza hacia adentro.

- 4** Si el equipo posee soporte de pelvis, desabroche la faja antes de posicionar al usuario. Luego ajústela.

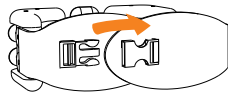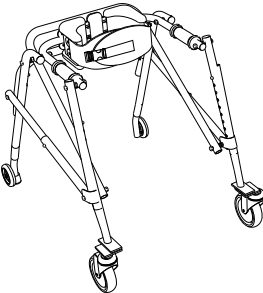

Desabroche la faja del soporte de pelvis

- 5** Si posee chiripá desabroche las 2 hebillas delanteras. Posicione al usuario y luego abroche las hebillas del chiripá.

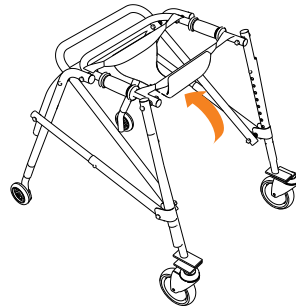


### Atención

#### RECOMENDAMOS LA SUPERVISION CONTINUA DE UN ACOMPAÑANTE O PERSONAL CAPACITADO

Verificar periódicamente el funcionamiento correcto de las fajas. Puntualmente el velcro de sujeción, las hebillas plásticas de seguridad y las costuras de las cintas. Ellas proveen la sujeción, soporte, estabilidad del usuario. Si el usuario requiere del uso de chiripá o soporte de pelvis, también recomendamos el uso de tomas anteriores para evitar que el usuario se caiga hacia adelante. La seguridad del usuario puede correr peligro si se utilizan por separado.

## POSICIONAMIENTO CORRECTO


- Recomendamos usar las empuñaduras a la altura de la cadera del usuario. Si el agarre está por encima, el usuario hará un esfuerzo innecesario con los hombros para desplazarse
- Los brazos del usuario deben tener una ligera flexión.
- Si las empuñaduras quedan por debajo de la cadera, hará que el usuario curve su espalda, provocando una mala postura.

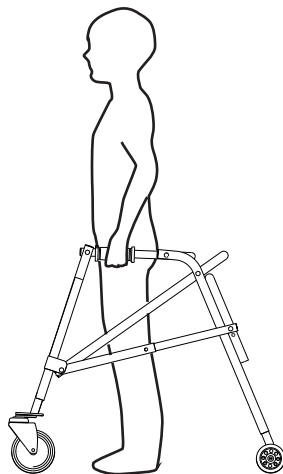

### Atención


Estos parámetros son los recomendados técnicamente. Evalúe junto al profesional a cargo los ajustes finos para cada usuario.

## ACCESORIOS OPCIONALES

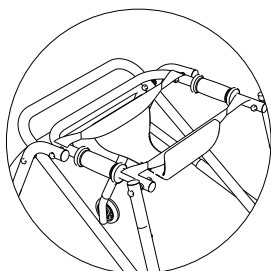


### Chiripa de 4 puntos

Sostiene al usuario para que no se colapse.

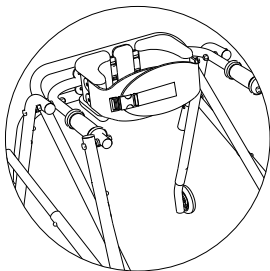


### Soporte de Pelvis

Estabiliza la pelvis en la línea media

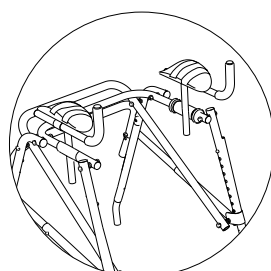

### Apoyo Antebraqueal

Proporciona una zona de descarga para el antebrazo. Incluye toma giratoria

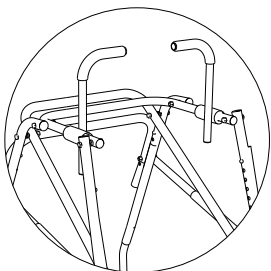


### Toma anterior

Se adaptan a distintas necesidades del usuario

El logo y el nombre REHAB son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

 Pola 2477, CABA - Argentina

 [www.rehab.com.ar](http://www.rehab.com.ar)

 +54 11 4635 7177 (Líneas Rotativas)

 /Rehab.Argentina