

CE FDA



PrimeCast™

Venda de plástica, rígida de Fibra de Vidrio

PrimeCast™ es una venda de yeso plástico sintético con resina de poliuretano, que se activa con agua antes de su uso. La calidad de **PrimeCast™** está aprobada a través de años de ventas exitosas en todo el mundo y es sin duda uno de los productos de mayor calidad actualmente disponibles en el mercado. Estas vendas son de industria coreana.

PrimeCast™ permite el movimiento controlado acelerando el proceso de sanación en la zona afectada. Se puede utilizar también combinando las vendas **PrimeCast** con las vendas rígidas estándares para proporcionar movimiento sólo en un área específica.

INDICACIONES

Todo tipo de férulas y yesos en cirugía ortopédica y traumatología.

Presenta:

- **Excelente moldura:** el estiramiento multidireccional brinda una excelente moldura en el área curva de los miembros superiores e inferiores del usuario brindando una colocación muy sencilla
- **Buena Terminación:** el sustrato de alta calidad y la fórmula de resina especial proporcionan una superficie lisa, así como una laminación final limpia y fuerte
- **Rentable:** se requiere menos cantidad de rollos en comparación con el vendaje POP.
- **Elección de fibra de vidrio y poliéster:** para aquellos que prefieren sustratos que no sean de fibra de vidrio, hay disponibles vendas de poliéster de alta calidad.
- **Alta resistencia:** con un mismo número de capas se consigue una mayor resistencia a la rotura que otras vendas
- **Vendas entrelazadas:** menor pérdida de material. La unión entre capas es más íntima, lo que a su vez produce una mayor resistencia.
- **Menor peso de material:** al ser un producto que no se percibe, para los usuarios es un gran alivio a la hora de utilizarlo
- **Durabilidad, permeabilidad al aire y transparencia de rayos X.**

Como usar



1. Aplicar la venda PrimePad sobre la zona deseada para luego colocar la venda PrimeCast



2. Utilizar Guantes de latex
3. Sumergir la venda PrimeCast en el agua durante 1-2seg



4. Apretar la venda con cuidado para eliminar el exceso de agua y envuelva la zona deseada con la venda. No aplicar con fuerza



El moldeado y el conformado deben realizarse en ese momento. El tiempo de fraguado es de 3-5 minutos. La rigidez por completo del material se consigue aproximadamente a los 20 minutos

Orden de pedido

Colores disponibles



N°. Ref.	Descripción	Tamaño	Rollos/ Caja Interna	Caja interna/Caja Externa
F 2	PrimeCast™ Fiberglass 2in	5.0cm x 3.6m (2in x 4yd)	10Rolls/Box	9Boxes/CTN
F 3	PrimeCast™ Fiberglass 3in	7.6cm x 3.6m (3in x 4yd)	10Rolls/Box	9Boxes/CTN
F 4	PrimeCast™ Fiberglass 4in	10.2cm x 3.6m (4in x 4yd)	10Rolls/Box	9Boxes/CTN
F 5	PrimeCast™ Fiberglass 5in	12.7cm x 3.6m (5in x 4yd)	10Rolls/Box	9Boxes/CTN
P 2	PrimeCast™ Polyester 2in	5.0cm x 3.6m (2in x 4yd)	10Rolls/Box	9Boxes/CTN
P 3	PrimeCast™ Polyester 3in	7.6cm x 3.6m (3in x 4yd)	10Rolls/Box	9Boxes/CTN
P 4	PrimeCast™ Polyester 4in	10.2cm x 3.6m (4in x 4yd)	10Rolls/Box	9Boxes/CTN
P 5	PrimeCast™ Polyester 5in	12.7cm x 3.6m (5in x 4yd)	10Rolls/Box	9Boxes/CTN
S 2	PrimeCast™ Soft (Flexible) 2in	5.0cm x 3.6m (2in x 4yd)	10Rolls/Box	9Boxes/CTN
S 3	PrimeCast™ Soft (Flexible) 3in	7.6cm x 3.6m (3in x 4yd)	10Rolls/Box	9Boxes/CTN
S 4	PrimeCast™ Soft (Flexible) 4in	10.2cm x 3.6m (4in x 4yd)	10Rolls/Box	9Boxes/CTN
S 5	PrimeCast™ Soft (Flexible) 5in	12.7cm x 3.6m (5in x 4yd)	10Rolls/Box	9Boxes/CTN

Prime
MEDICAL INC

Prime Medical Inc. Korea
189 Gumdang-ri, Mado-myon, Hwasung-si,
Gyeonggi-do, Korea
Tel. +82-31-355-8374 / Fax. +82-31-355-8320
sales@primemedical-inc.com
www.primemedical-inc.com

Prime Medica Promotion Pvt. Ltd. India
107, Neelkanth Estate No. 1 Sativali,
Vasai (E), Dist: Thane-401 208 Maharashtra, India
Tel. +91-250-3291725 / 6526135
Fax. +91-250-2480551
india@primemedical-inc.com



Almacenamiento

Prime
Medical Inc.