

MANUAL DE USUARIO

Ruedas especiales para la playa.

1-Material de las ruedas.

Están fabricadas con poliuretano. Las cubiertas permiten el andar sobre superficies blandas evitando que se entierren como ocurre con las ruedas estrechas.

Al ser ruedas neumáticas si se utiliza en terrenos inapropiados puede sufrir daño y pérdida de aire.



2-Adaptación

Estas ruedas se pueden montar para uso ocasional en su silla de ruedas siempre y cuando cumpla con los requisitos evaluados previamente por el técnico.

3-Datos Técnicos de la rueda

Peso máximo	Rodado	Ancho
85 kg	14"	10"




Montaje de ruedas de playa

4.1 Retirar las ruedas originales de la silla, en este caso la Silla Lighting, sacando la tuerca del perno



4.2 Colocar el eje en la rueda de playa

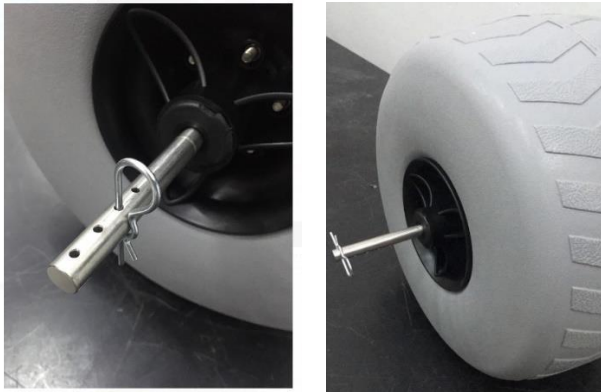

4.3 Colocar la arandela seeger en ambos lados del eje con una pinza pico de loro, en el bajo relieve del eje.



4.4 Colocar la rueda de playa armada con el eje, por el agujero donde se coloca las ruedas de la Silla Lightning. Luego colocar la chaveta en R en el agujero del eje

